

# CPAP\* Quick Start

## Airsense 11

### Commencer la thérapie

1. Appliquer le masque correctement, comme indiqué par l'intervenant (voir les photos sur le sac du masque).
2. Appuyer sur le bouton START/STOP en haut de l'appareil.

### Arrêter la thérapie

1. Appuyer sur le bouton START/STOP en haut de l'appareil.
2. Enlever le masque.
3. Le rapport de sommeil sur l'écran indique un résumé de la séance de thérapie et d'une fuite éventuelle du masque.



Heures d'utilisation par nuit



Apnées/hypopnées enregistrées par heure



Étanchéité du masque

**Utiliser MINIMUM 4h chaque nuit !**



\*Continuous Positive Airway Pressure





## Masque

1

### Tous les jours

Laver à l'eau tiède  
avec du savon doux

2

### Tous les mois

Laver les sangles  
(à la main ou dans un  
filet à la machine à laver  
max 30°C)



### Savon doux :

Gel douche, shampoing,  
savon pour les mains...  
Sans alcool ni  
eau de Javel !

1

1x

### par semaine

Veiller à ce que le filtre  
reste propre en le  
contrôlant une fois par  
semaine

## Filtres

2

### Tous les 6 mois

Remplacer le filtre

3

### Filtre allergie

Remplacer tous les  
mois (si utilisé)

