

CPAP* Quick Start

Airsense 11

De therapie starten

1. Breng het masker correct aan zoals de zorgverstrekker u getoond heeft. (zie foto's op zak van masker)
2. Druk op de START/STOP knop bovenaan uw toestel.

De therapie stoppen

1. Druk op de START/STOP knop bovenaan uw toestel.
2. Zet uw masker af.
3. Het slaaprapport op uw scherm geeft u nu een samenvatting van uw therapiesessie en van de eventuele lekken op uw masker.



Gebruikte uren laatste nacht



Apneu- en hypopneugebeurtenissen per uur slaap




Informatie over de maskerafdichting

MINIMUM 4u elke nacht gebruiken!



*Continuous Positive Airway Pressure



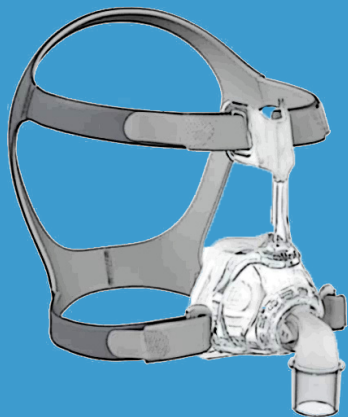

Masker

1

Dagelijks

Wassen in lauw water
met milde zeep

2

Maandelijks

Hoofdband wassen
(met de hand of in een
netje in wasmachine
max 30°C)



Milde zeep:

Douchegel, shampoo,
handzeep...
Zonder alcohol of
bleekwater!

1

**1x
per week**

Waak erover dat uw
filter zuiver blijft door
deze één keer per
week te controleren

Filter

2

6 maandelijks

Vervangen van filter

3

Allergiefilter

Elke maand vervangen
(enkel gebruiken indien
allergieën)

