

Bevochtiger



Quick

Start

Airsense 11

1

Trek het reservoir los van uw CPAP toestel

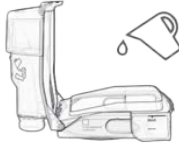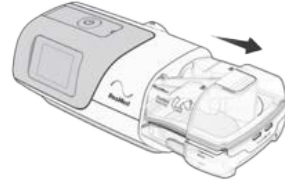


2

Vul het reservoir met water vrij van kalk.
(gevuld tot +/- max streep)

3

Schuif het reservoir in de opening van
uw toestel

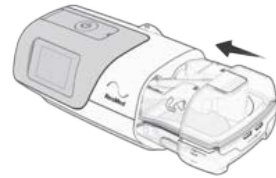

Veranderen vochtigheidsniveau

- 1 Duw op het kleine huisje linksboven in het scherm. Indien het niet zichtbaar is, anders direct stap 2.
- 2 Selecteer «Mijn opties» (in blauw).
- 3 Selecteer «Vochtigheidsniv».
- 4 Selecteer het vochtigheidsniveau (standaard = 4).
- 5 Uit MENU gaan: duwen op klein huisje.

Type water gebruiken

- Gedestilleerd water (apotheker)
- Leidingwater: minimum 20 min. laten koken en afkoelen
- Flessenwater

Kalkaanslag

Spoelen in warm water met verdunde azijn. Verdunnen met 1 volume azijn voor 10 volumes water.

Onderhoud Bevochtiger

Dagelijks

- Water verversen
- Slang ontkoppelen en laten uitlekken/drogen

Wekelijks

- Reinigen met zeep
- Slang uitspoelen

Tips om condens tegen te gaan

1

Toestel op grond plaatsen

2

Kamer vensters dicht

3

Zachte temperatuur in de slaapkamer

4

Slang onder lakens warmhouden

5

Vochtighedsniveau aanpassen op toestel

