

CPAP* Quick Start Löwenstein Prisma



Commencer
la
thérapie

1. Appliquer le masque correctement, comme indiqué par l'intervenant (voir les photos sur le sac du masque).
2. Appuyer sur le bouton START/STOP au milieu de l'appareil.
3. Au milieu de la nuit, si la pression est trop forte, vous pouvez la baisser en appuyant sur le bouton 

Arrêter
la
thérapie


1. Appuyer sur le bouton START/STOP au milieu de l'appareil.
2. Enlever le masque.
3. Le rapport de sommeil sur l'écran indique un résumé de la séance de thérapie.

Utiliser MINIMUM 4h chaque nuit !



*Continuous Positive Airway Pressure



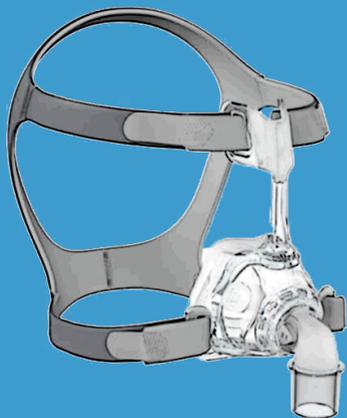

Masque

1

Tous les jours

Laver à l'eau tiède
avec du savon doux

2

Tous les mois

Laver les sangles
(à la main ou dans un
filet à la machine à laver
max 30°C)



Savon doux :

Gel douche, shampoing,
savon pour les mains...
Sans alcool ni
eau de Javel !

1

1x par semaine

Veiller à ce que le filtre
noir reste propre en le
contrôlant une fois par
semaine

Filtres

2

Tous les 6 mois

Remplacer le filtre

3

Filtre allergie (blanc)

Remplacer tous les
mois (si utilisé)

