

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE



*Aborder au mieux sa **thérapie***

Me sentir confiant
avec mon **équipement**
d'oxygène liquide



page 4 Mon équipement d'oxygène
en un clin d'oeil

page 5 Commencer à utiliser
ma cuve d'oxygène liquide

page 9 Commencer à utiliser
mon équipement d'oxygène
liquide portable

page 10 Comment utiliser
mon équipement d'oxygène
liquide en toute sécurité

Aborder au mieux

Un système d'oxygène liquide est une des solutions médicales pour répondre à vos besoins d'oxygénothérapie à long terme. Pourtant, nous savons qu'il peut être intimidant de commencer à utiliser un appareil à oxygène.

Cette brochure est un guide de démarrage rapide pour vous aider à mieux connaître le nouvel équipement d'oxygène à domicile : la cuve d'oxygène liquide, l'équipement d'oxygène liquide portable ainsi que les autres accessoires d'oxygène.

Pour des informations plus détaillées sur l'utilisation des appareils, nous vous recommandons de vous référer au guide d'utilisation complet pour obtenir toutes les informations, être actif dans votre prise en charge globale, et ainsi améliorer votre qualité de vie.

sa thérapie

Mon équipement d'oxygène en un clin d'oeil

Les appareils à oxygène liquide contiennent de l'oxygène liquéfié à très basse température (-183°).

Avant d'être inhalé, l'oxygène liquide est réchauffé à température ambiante à l'intérieur de l'équipement (afin de le transformer en oxygène respirable).

Cet équipement, ainsi que les dispositifs ci-dessous, sont utilisés pour **délivrer votre oxygénothérapie.**



Rallonge



Humidificateur



Canule à oxygène



Humidificateur

Collecteur
d'eau
condensée


Cuve

Unité portable

Commencer à utiliser ma cuve d'oxygène liquide

1 Comment installer le collecteur d'eau condensée

- Le collecteur d'eau condensée recueille l'humidité qui se crée pendant l'administration d'oxygène.
- Vérifiez qu'il est propre et vide, puis installez-le sur l'unité de base.

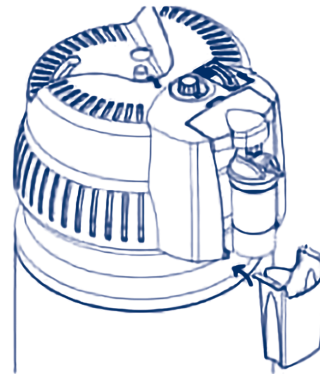

Chaque jour, jetez l'eau recueillie



Nettoyer le récipient régulièrement avec du savon et de l'eau chaude




Chaque jour, jetez l'eau résiduelle, rincez l'humidificateur à l'eau du robinet et remplissez-le d'eau*.



Nettoyez l'humidificateur chaque semaine avec de l'eau et du savon

2 Comment connecter mon humidificateur



- L'humidificateur ajoute de l'humidité à l'oxygène afin d'éviter la sécheresse du nez et de la gorge.
- Si vous utilisez un humidificateur, commencez par le remplir d'eau* jusqu'à la ligne de remplissage maximale, puis fermez soigneusement le bouchon.
- Vous pouvez maintenant fixer l'humidificateur à la sortie oxygène de l'unité de base.

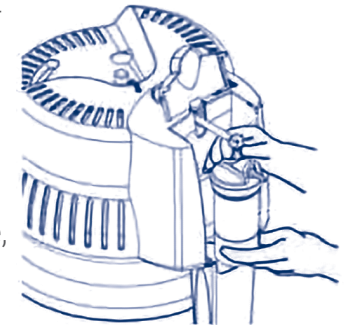


*Eau stérile pour l'inhalation, eau purifiée ou eau potable bouillie.

3 Comment connecter ma tubulure et mes canules nasales à la cuve

- Ces articles à usage unique (tubulure, canule à oxygène) sont nécessaires pour administrer votre oxygénothérapie.

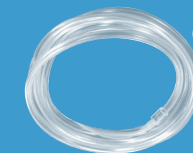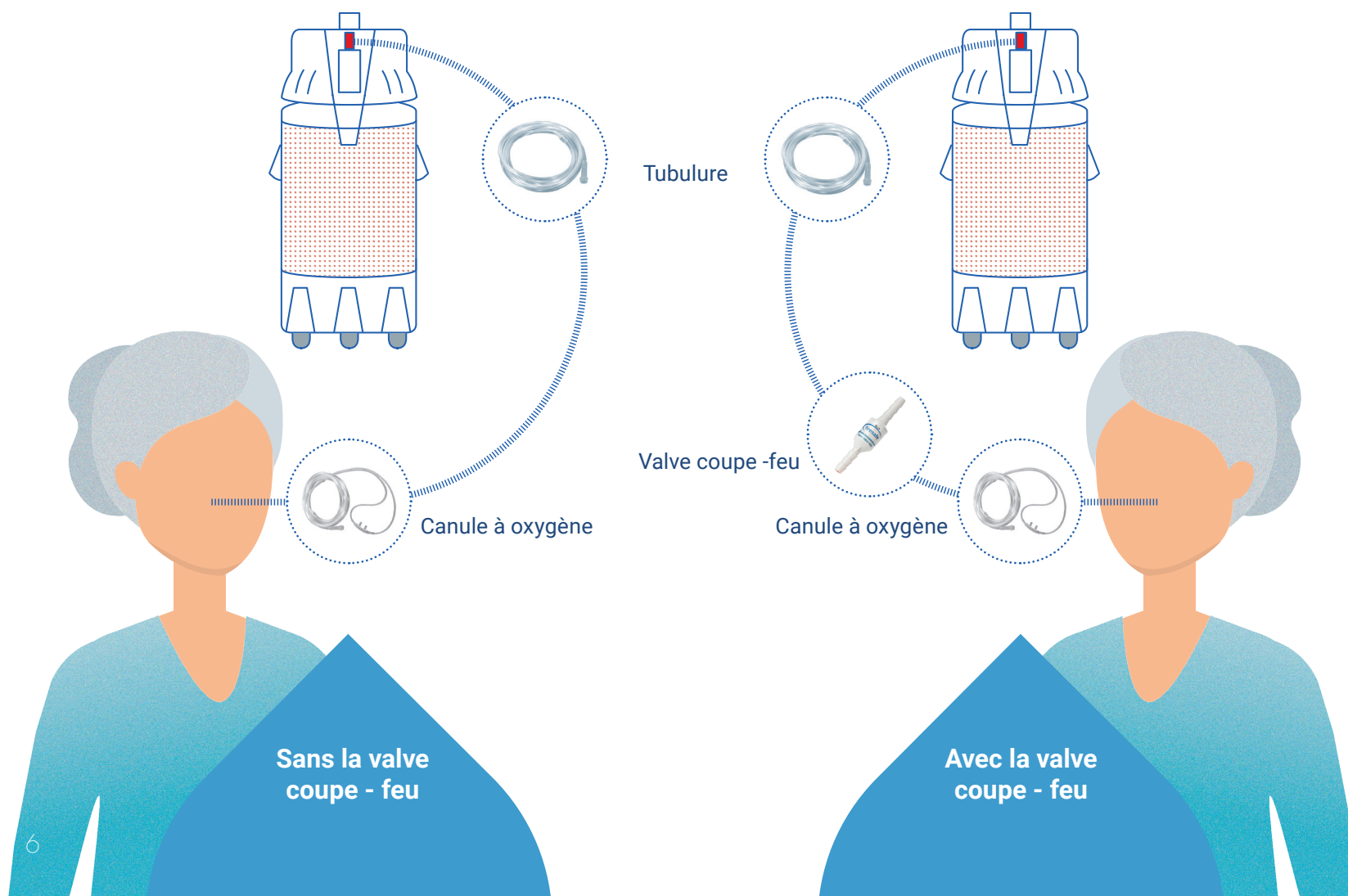

Vérifiez que votre tubulure n'est pas pliée ou courbée. Cela peut interrompre le flux d'oxygène, il faut donc les éliminer si vous en trouvez.

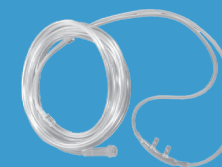

Essayez chaque jour les branches de votre canule nasale avec un chiffon humide.

4 Comment sélectionner mon débit d'oxygène et vérifier le niveau d'oxygène de ma cuve



Le débit d'oxygène correspond à la quantité de litres d'oxygène gazeux délivré par minute par votre appareil à travers les canules et les tubulures.


Votre médecin a choisi un débit d'oxygène adapté à vos besoins et l'a reporté sur votre ordonnance.

- Réglez le débitmètre sur le débit prescrit en tournant le bouton de commande dans le sens des aiguilles d'une montre.




- Assurez-vous que le bouton de commande est correctement positionné.

Lorsqu'il est réglé entre deux valeurs de débit, l'oxygène n'est pas délivré.

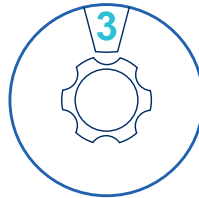

UNIQUEMENT dans le cas où votre médecin a modifié le débit sur votre ordonnance, vous pouvez régler le bouton de commande dans le sens des aiguilles d'une montre sur le nouveau débit prescrit.

- Il est important de **vérifier chaque jour le niveau d'oxygène dans la cuve**. Pour ce faire, il suffit d'appuyer sur le bouton indicateur de niveau, pendant au moins deux secondes.
- Un affichage dans la **zone orange indique une quantité suffisante d'oxygène**. Un affichage dans la **zone rouge indique une quantité insuffisante d'oxygène**.
- Lorsque vous n'utilisez pas votre unité de base liquide, n'oubliez pas de l'éteindre.

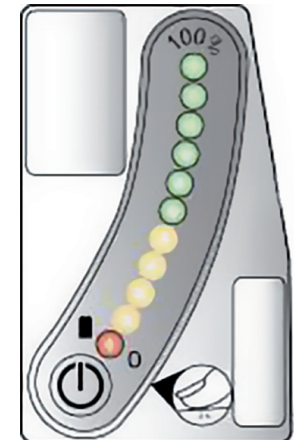

5 Comment porter mes canules nasales

Canules nasales

Insérez vos canules nasales dans vos narines. Chaque branche de la canule doit être insérée dans une narine. Une fois les branches en place, faites passer les tubes par-dessus vos oreilles. Déplacez le curseur vers le haut ou le bas pour ajuster l'ajustement jusqu'à ce qu'il soit sous votre menton.

Instructions à suivre

- Le nettoyage doit se limiter aux parties extérieures, en utilisant une éponge légèrement humide et **non des substances inflammables**, comme des produits de nettoyage corrosifs ou de l'alcool.
- Vous devez remplacer votre canule nasale ainsi que votre tubulure **tous les mois**.



Commencer à utiliser mon équipement d'oxygène liquide portable

Les équipements d'oxygène liquide portables sont des dispositifs compacts et légers qui vous permettent de rester mobile avec votre oxygène.



1 Comment remplir mon équipement d'oxygène liquide à partir de ma cuve

- Avant de remplir l'équipement portable, utilisez un chiffon propre et sec pour nettoyer les connecteurs de la cuve et de l'équipement portable.
- Tenez l'équipement portable à deux mains et connectez-le à la cuve.
- Ouvrez la valve de purge et appliquez une pression. Vous allez entendre un fort sifflement.
- Lorsque vous entendez un changement de son et remarquez une vapeur blanche et dense provenant de la cuve, fermez la valve de ventilation. Ensuite, désengagez l'équipement portable.
- **Vérifiez l'indicateur de teneur en oxygène liquide de l'équipement portable.**




2 Comment utiliser mon équipement portable

- Connectez la canule à oxygène à la sortie de votre équipement portable.
- Tournez le bouton de réglage du débit en fonction de votre prescription.



Comment utiliser mes équipement d'oxygène liquide en toute sécurité

- Évitez tout contact avec l'oxygène liquide et les vapeurs associées, c'est un liquide très froid qui provoque des brûlures.
- Ne pas toucher les parties froides ou givrées.
- **Maintenez la cuve et les équipements portables en position verticale pour éviter les fuites, ne pas toucher les connecteurs de la cuve ou de l'équipement portable après le remplissage.**
- L'oxygène permet à de nombreuses choses de brûler plus rapidement et de s'enflammer plus facilement.
Pour réduire le risque d'incendie :
 - **Ne fumez pas** et ne laissez personne fumer à proximité de vous ou de votre équipement d'oxygène.
 - Tenir à l'écart des **flammes** (au moins 3 mètres).
 - Tenir éloigné des **appareils électriques**, du poêle, des radiateurs, des sources de lumière (au moins 1,5 mètres).
 - N'utilisez pas **d'aérosol ou de solvant** à proximité de votre équipement d'oxygène.
 - Seuls les **produits à base d'eau** sont sans danger pour le visage et les mains lors de l'utilisation d'oxygène.
 - **Ne manipulez pas votre concentrateur avec des mains grasses.**
- **Reportez-vous au guide d'utilisation complet pour connaître toutes les mesures de sécurité et des instructions plus détaillées sur l'utilisation des appareils à oxygène.**

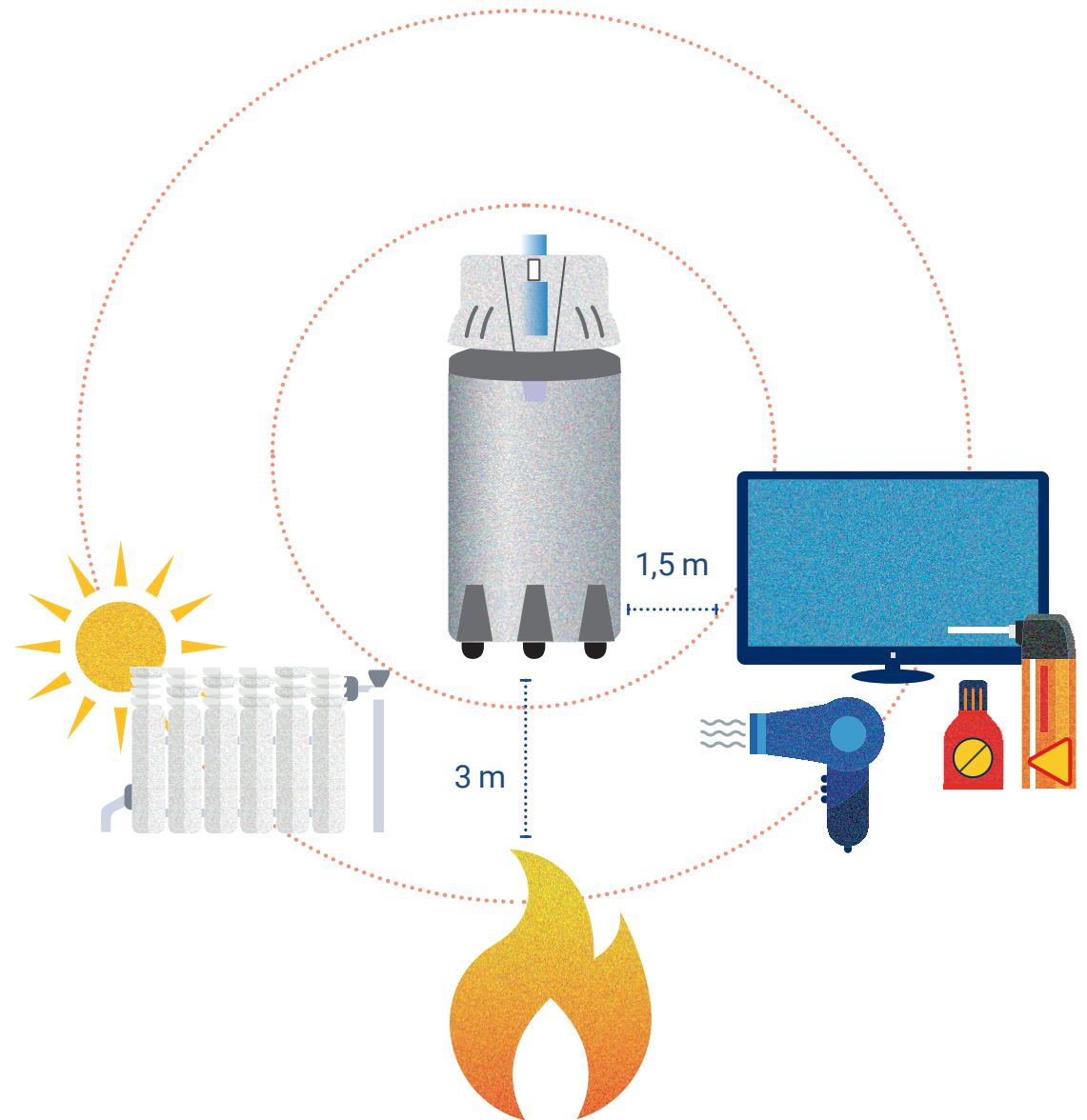



*Adapter au mieux
sa thérapie*



©Sophie Loubaton / CAPA Pictures

Aborder au mieux sa *thérapie*

Scannez ce QR code pour
découvrir notre vidéo de
présentation des équipements
d'oxygène liquide!



Air Liquide Healthcare est un leader mondial des gaz médicaux, des services de soins à domicile et des ingrédients de spécialité. Nos 16 300 collaborateurs accompagnent 1,8 million de patients chroniques et desservent 15 000 hôpitaux et nouveaux lieux de soins.

Nous nous engageons aux côtés des professionnels et des institutions pour améliorer la santé et la qualité de vie des patients et rendre le système de santé plus efficace et plus vertueux pour tous. L'approche des soins de santé centrée sur le patient et fondée sur la valeur fait pleinement partie de notre stratégie et notre signature «Changing Care. With you» reflète cet engagement. En 2021, l'activité Healthcare du Groupe a atteint 3,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires.

Changing care. With you.

VitalAire
Erasmuslaan, 40
1804 - ZEMST, BELGIQUE

www.be.vitalaire.com
+32 2 255 96 00

