

Commencer la thérapie

1. Appliquer le masque correctement, comme indiqué par l'intervenant (voir les photos sur le sac du masque).
2. Appuyer sur le bouton START/STOP.
3. Pour commencer à une pression plus basse, appuyer sur ce bouton. 
4. Pour régler l'humidification, appuyer sur ce bouton. 

Arrêter la thérapie

1. Appuyer sur le bouton START/STOP.
2. Enlever le masque.
3. Le rapport de sommeil sur l'écran indique le nombre d'utilisation de l'appareil pendant la dernière nuit.

Dernière session 

Heures thérapie 0:00

IAH 0.0

Ajust. Masque Correct

Utiliser MINIMUM 4h chaque nuit !





Humidificateur

Veillez utiliser de l'eau distillée.

1

Tous les jours

Changer l'eau
Débrancher le tuyau,
égoutter et sécher

2

Tous les semaines

Nettoyer au savon
Rincer le tuyau



Masque

Laver quotidiennement
à l'eau tiède avec un
savon doux (pas de
liquide vaisselle).



Dépot calcaire

Rincer au vinaigre dilué et
à l'eau chaude

1

Gris: 1x/semaine

Rincer / Souffler

Filtres

2

Gris: Tous les 6 mois

Remplacer le filtre

3

Bleu clair: Filtre allergie

Remplacer tous les
mois (si utilisé)

