

CPAP

Quick Start DS2 & DS2 Advanced




De therapie starten

1. Breng het masker correct aan zoals de zorgverstrekker u getoond heeft (zie foto's op zak van masker).
2. Druk op de knop START/STOP.
3. Druk op deze knop om met een lagere druk te beginnen. 
4. Druk op deze knop om de bevochtiging aan te passen. 

De therapie stoppen

1. Druk op de knop START/STOP.
2. Zet uw masker af.
3. Het slaap rapport op uw scherm geeft u nu aan hoeveel uur u uw toestel heeft gebruikt.

Laatste sessie 

Gebruiksuren 0:00

AHI 0.0

Masker Past goed!

MINIMUM 4u elke nacht gebruiken!



Onderhoudstips CPAP & accessoires



Bevochtiger

Gebruik gedestilleerd water.

1

Dagelijks

Water verversen
Koppel de slang los,
laat leeglopen en
droog

2

Wekelijks

Reinigen met zeep
Slang spoelen



Kalksteenafzetting

Spoelen met verdunde
azijn en heet water



Masker

Dagelijks wassen in
lauw water met
zachte zeep (geen
afwasmiddel)

1

Grijs: 1x/week

Uitblazen / spoelen

Filter

2

Grijs: 6 maandelijks

Vervangen van filter

3

Lichtblauw: Allergiefilter

Elke maand
vervangen

